



Zestaw do Pobierania Próbek Stolca

przewodnik dla Pacjenta

JAK POBRAĆ SWOJĄ PRÓBKĘ

1 UPEWNIJ SIĘ, ŻE MASZ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:


1. Łyżka do pobierania próbki z tworzywa sztucznego.



4. Torba na odpady biologiczne.




2. Probówka do pobierania próbki z płynem konserwującym w środku.

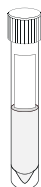

5. Koperta do przesłania próbki.



3. Dwa arkusze do zebrania próbki.

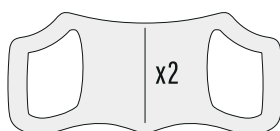

- Jeśli brakuje któregokolwiek z tych elementów, nie należy używać Zestawu do Pobierania Próbek Stolca. Przed użyciem zestawu należy zapoznać się z instrukcją wysyłki i danymi kontaktowymi.
- Pobierz próbkę w dniu, w którym będziesz w stanie wysłać ją **W CIĄGU 24 h** od pobrania.

 **PRZEJDŹ DO NASTĘPNYCH KROKÓW, JEŚLI JESTEŚ GOTOWY(-A) NA POBRANIE PRÓBK**

Obowiązuje od: 2024.06.11 | str. 1/9






JAK POBRAĆ SWOJĄ PRÓBKĘ

2 UMIEŚĆ ARKUSZ DO ZEBRANIA PRÓBKI NA SEDESIE


1. Podnieś pokrywę sedesu ORAZ deskę sedesową.

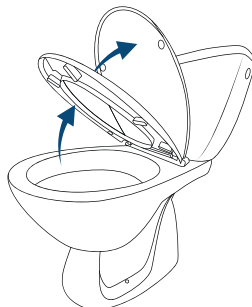


2. Otwórz opakowanie i wyjmij arkusz do zebrania próbki.



3. Odklej folię ochronną z arkusza do zebrania próbki w celu odśtonięcia pasków samoprzylepnych, jak pokazano na rysunku:

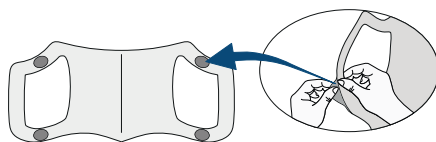

4. Umieść i przyklej pasek samoprzylepny arkusza do zebrania próbki nad brzegiem toalety.

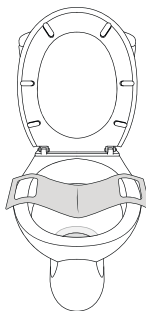

- Upewnij się, że arkusz do zebrania próbki delikatnie opada w dół, pozostawiając wystarczająco dużo miejsca na zebranie próbki i utrzymanie stolca z dala od ciała.
- Upewnij się, że arkusz do zebrania próbki nie dotyka wody w sedesie.






JAK POBRAĆ SWOJĄ PRÓBKĘ

3 WYPRÓŻNIJ SIĘ

- Jeśli masz problemy z siedzeniem i staniem podczas korzystania z toalety, skorzystaj z pomocy.

1. Opuść deskę sedesową na arkusz do zebrania próbki

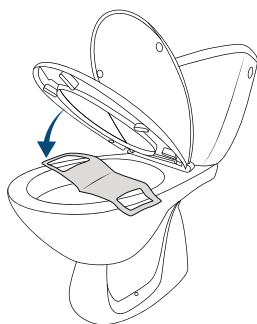

2. Usiądź na sedesie i wypróżnij się na arkusz do zebrania próbki, upewniając się, że arkusz wyłapie próbkę stolca.

- Staraj się nie dopuścić do tego, aby mocz dostał się na arkusz do zebrania próbki i na próbkę stolca.
- **NIE WOLNO** rzucać papieru toaletowego na arkusz do zebrania próbki ani na próbkę stolca.







JAK POBRAĆ SWOJĄ PRÓBKĘ

4 UMIEŚĆ PROBÓWKĘ NA STOJAKU


1. Zamknij Zestaw do Pobierania Próbek Stolca. Na górze pokrywy znajduje się okrągły otwór służący jako stojak na probówkę.

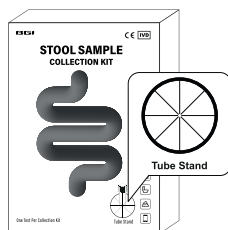

2. Weź probówkę, zrób otwór w środku okręgu i umieść probówkę na powstałym stojaku z nakrętką skierowaną do góry.

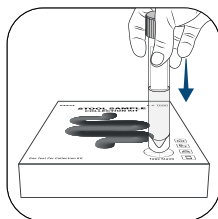

3. Otwórz probówkę przekręcając zakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
W razie potrzeby przytrzymaj probówkę drugą ręką.

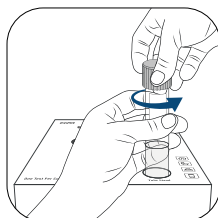





JAK POBRAĆ SWOJĄ PRÓBKĘ

5 POBIERZ PRÓBKĘ STOLCA ZA POMOCĄ ŁYŻKI DO POBIERANIA PRÓBKI I UMIEŚĆ JĄ W PROBÓWCE


1. Użyj łyżki do pobierania i zbierz jedną pełną próbkę stolca z dwóch lub trzech różnych miejsc z powierzchni stolca.

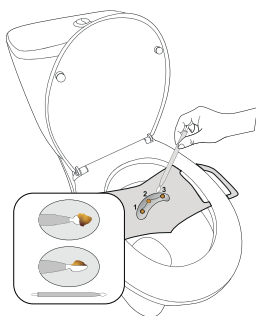

2. Włóż łyżkę z próbką stolca z powrotem do probówki, która jest umieszczona na stojaku na probówce. Popchnij łyżkę w kierunku dna probówki, aby upewnić się, że próbka jest całkowicie zanurzona w płynie konserwującym. Naciśnij na górną część uchwyty łyżki, aby odłączyć łyżkę od uchwyty.

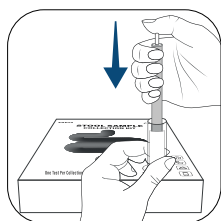

3. Delikatnie wyciągnij uchwyt łyżki z probówki. Uchwyt łyżki można wyrzucić.

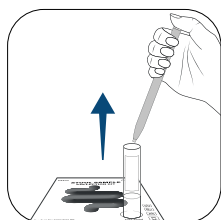




JAK POBRAĆ SWOJĄ PRÓBKĘ


6 ZAMKNIJ PROBÓWKĘ I SPŁUCZ TOALETĘ

1. Zakręć zakrętkę obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.


Jeśli probówka nie zostanie prawidłowo zamknięta, a zakrętka dokręcona, płyn może wyciec z probówki.

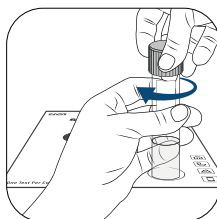

2. Delikatnie wyciągnij zamkniętą probówkę ze stojaka na probówkę.

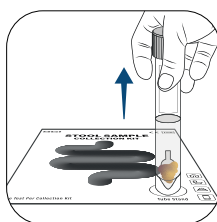

3. Spłucz toaletę wraz z arkuszem do zbierania próbek.

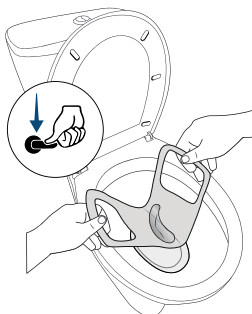




ZWROT

7 ODEŚLIJ PROBÓWKĘ Z PRÓBKĄ STOLCA

1. Umieść probówkę w torbie na odpady biologiczne.



2. Zamknij torbę na odpady biologiczne i włóż ją do koperty do wysyłki próbki.

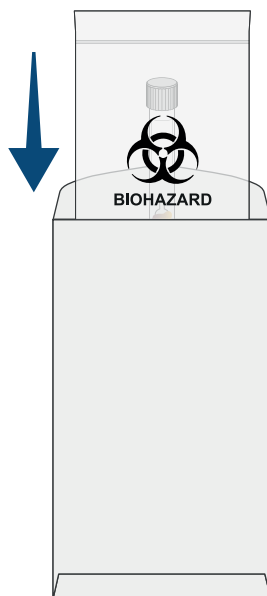

3. Postępuj zgodnie z instrukcją dostawy (krok 8).

-
- Upewnij się, że próbka stolca zostanie przesłana w ciągu 24 godzin od pobrania.
-







DOSTAWA

8 WYBIERZ FORMĘ DOSTAWY

1. Aby dostarczyć próbkę do badania wejdź na stronę: **badaniecolotect.com.pl** i zaloguj się do swojego Konta.

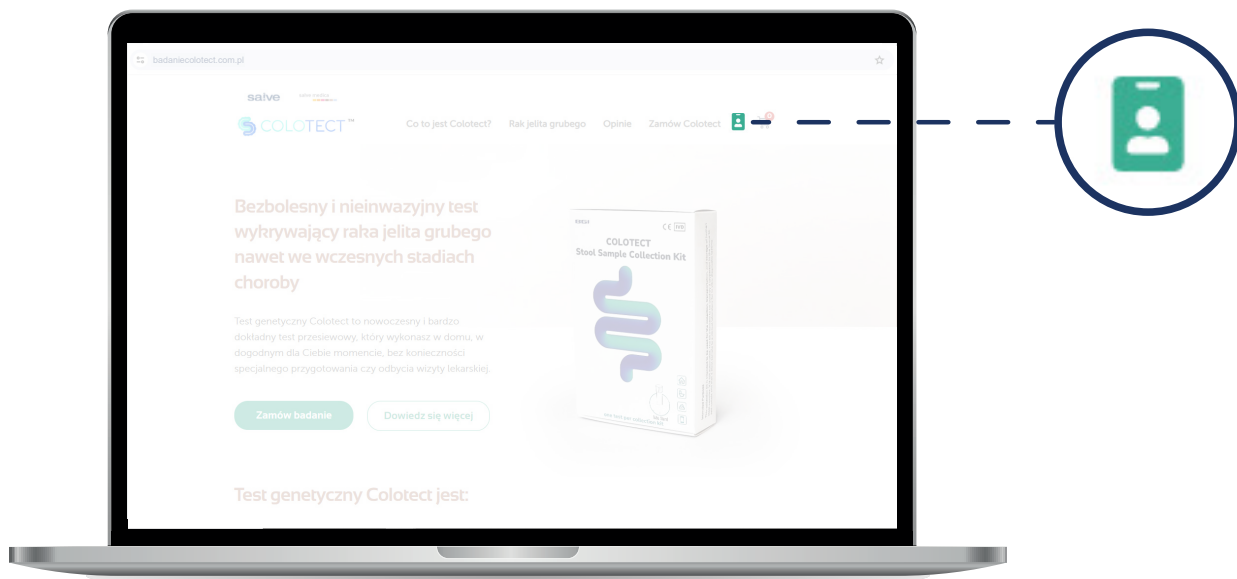


2. W zakładce zamówienia przy badaniu Colotect kliknij przycisk "oddaj próbkę".

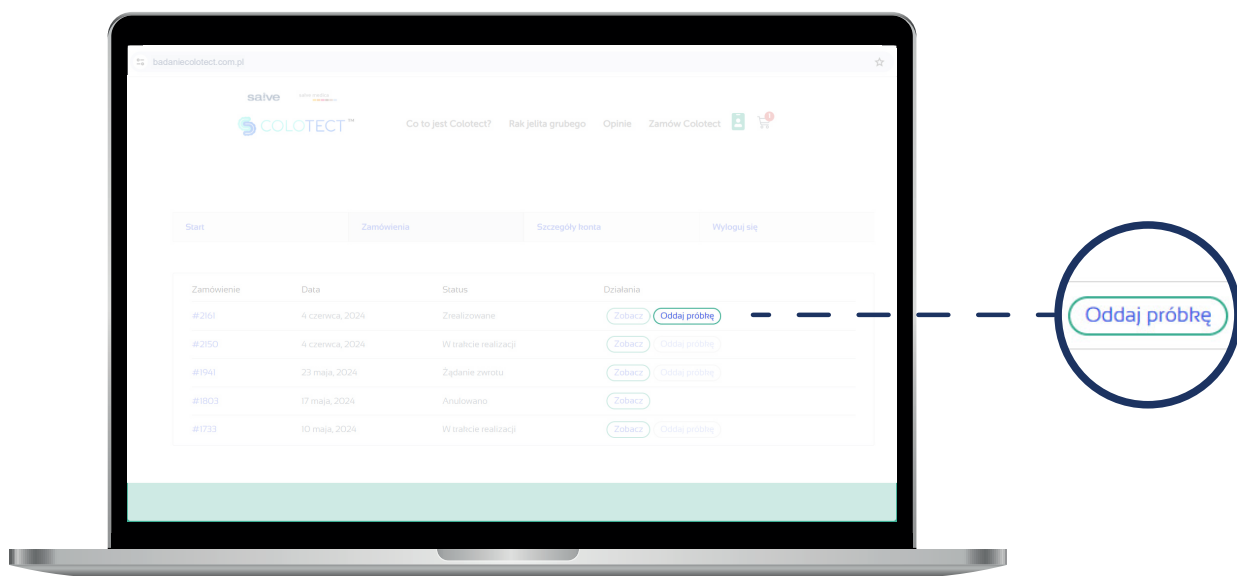



DOSTAWA

3. Następnie wybierz dogodną dla Ciebie formę dostawy (wysyłkę kurierem lub dostarczenie osobiście do placówki).

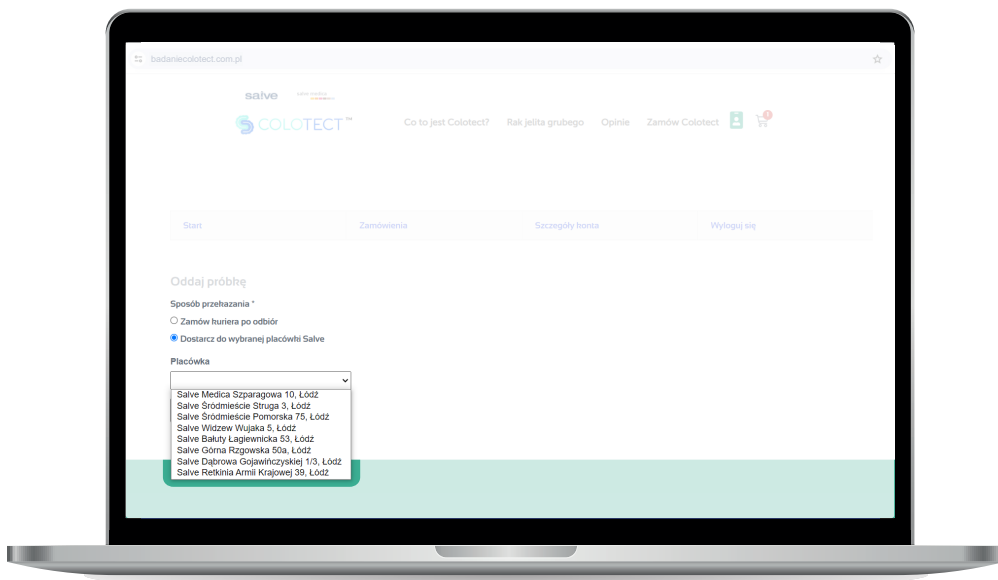

INFORMACJE DODATKOWE:

NAZWA RODZAJOWA PRODUKTU

Zestaw do Pobierania Próbek Stolica

ROZMIAR OPAKOWANIA

Jeden test na jeden Zestaw do Pobierania Próbek Stolica

NUMER KATALOGOWY

MFG010042

PRZEZNACZENIE

Ten zestaw jest przeznaczony do pobierania, transportu i przechowywania próbek ludzkiego stolca. Nie jest to zautomatyzowany proces. Zestaw jest przeznaczony do samodzielnego pobrania i przesłania próbki stolca do laboratorium klinicznego w celu przeprowadzenia badań diagnostycznych in vitro.

ZASADA BADANIA

Produkt ten jest przeznaczony do pobierania, transportu i przechowywania próbek ludzkiego stolca. Płyn konserwujący w probówce zawiera roztwór chlorku sodu <30% (NaCl) oraz inne składniki. Dzięki odpowiedniemu pH i wysokiej zawartości jonów soli, roztwór konserwujący może hamować degradację DNA i wzrost bakterii.

ELEMENTY ZESTAWU DO POBIERANIA PRÓBEK STOLCA

Produkt ten jest przeznaczony do pobierania, transportu i przechowywania próbek ludzkiego stolca. Płyn konserwujący w probówce zawiera roztwór chlorku sodu <30% (NaCl) oraz inne składniki. Dzięki odpowiedniemu pH i wysokiej zawartości jonów soli, roztwór konserwujący może hamować degradację DNA i wzrost bakterii.

Nazwa rodzajowa produktu	Ilość	Opis
Przewodnik dla pacjenta	1	Instrukcja obsługi Zestawu do Pobierania Próbek Stolica w języku angielskim
Łyżka do pobierania próbki z tworzywa sztucznego	1	Łyżka posiada odłączaną łopatkę
Arkusze do zebrania próbki	2	/
Probówka do pobierania próbki	4 ml płynu konserwującego na probówkę, 1 probówka	Płyn konserwujący w probówce zawiera roztwór chlorku sodu <30% (NaCl)
Torba na odpady biologiczne	1	/
Koperta do przesłania próbki	1	/

PRZECHOWYWANIE ZESTAWU DO POBIERANIA PRÓBEK STOLCA I OKRES PRZECHOWYWANIA PRZED UŻYCIEM

Zestaw do Pobierania Próbek Stolica należy przechowywać w temperaturze 2-30°C. Okres przechowywania produktu wynosi jeden rok. Należy sprawdzić, czy nie upłynął termin ważności zestawu. Należy sprawdzić, czy probówka była zamknięta w momencie dostawy. Po otwarciu probówki płyn konserwujący zachowuje trwałość przez 6 miesięcy przy przechowywaniu w temperaturze 2-30°C. Zestaw należy przechowywać z dala od ciepła i działania promieni słonecznych. Przechowywać z dala od dzieci.

PRZECHOWYWANIE ZESTAWU DO POBIERANIA PRÓBEK STOLCA PO UŻYCIU

Wyssyki Zestawu do Pobierania Próbek Stolica należy dokonać w ciągu 24 godzin od pobrania. Probka powinna być zbadana w laboratorium nie później niż siedem dni od daty pobrania, włączając w to czas przeznaczony na transport próbki. Warunki te dotyczą próbek przechowywanych i transportowanych w temperaturze 2-30°C.

TRANSPORT PRÓBK

Prosimy o jak najszybszy zwrot próbki, nie później niż 24 godziny od jej pobrania.

PRZECHOWYWANIE PRÓBK PO JEJ ODEBRANIU PRZEZ LABORATORIUM BADAWCZE

Probka może być przechowywana w temperaturze pokojowej przez siedem dni od momentu pobrania, włączając w to czas przeznaczony na transport próbki. Po siedmiu dniach próbkę należy przechowywać w laboratorium w niskiej temperaturze (poniżej -20°C) nie dłużej niż 12 miesięcy.

OSTRZEŻENIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Ten zestaw jest produktem jednorazowego użytku.
- Ten produkt nadaje się wyłącznie do pobierania, transportu i przechowywania próbek stolca.
- Płyn w probówce nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.
- Jeśli płyn dostanie się do oczu lub na skórę, należy przemyć to miejsce wodą.
- Nie należy wylewać płynu z probówki.
- Zestaw do Pobierania Próbek Stolica przechowywać z dala od dzieci.

Obowiązuje od: 2024.06.11 | str. 9/9

